

MANUEL UTILISATEUR

Fauteuil d'Accès au Bain

J.O.B.



1. INTRODUCTION

Cher Client,

Merci d'avoir choisi notre produit.

Vous avez remarqué que le fauteuil d'accès au bain J.O.B est livré démonté:

Nous allons vous décrire les opérations de montage qui sont très simples!

Les différents éléments à assembler sont (*en référence aux dessins de ce document*):

- A- Dossier avec toile tendue
- B- Repose pied avec toile tendue
- C- Support frontal
- D- Barre anti-basculement
- E- Chassis central
- F- 2 roues gonflées
- G- 10 Clips

2. ASSEMBLAGE

Merci de suivre les étapes suivantes (en observant les dessins):

#1.

Insérer la barre anti-basculement (D) et le support frontal (C) dans le châssis central (E), en tirant et remettant leurs clips respectifs (Fig.1).

S'assurer que les tubes sont bien bloqués.

Note: La longueur de la barre anti basculement est réglable.

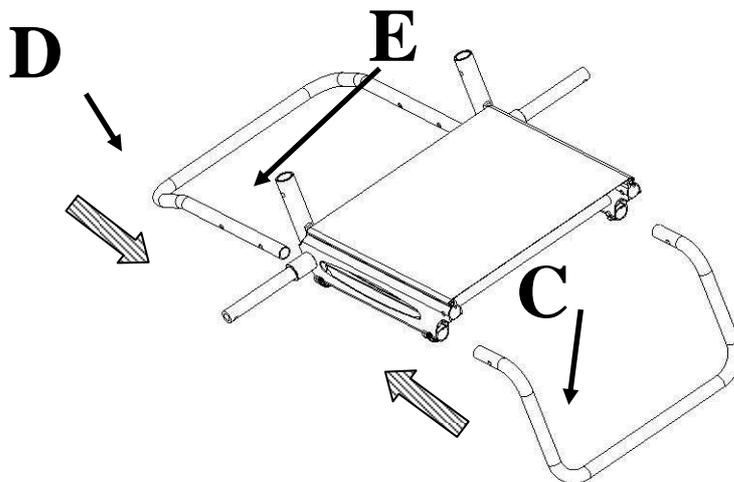


Fig.1

NOTE: Les tubes (D) and (C) ont la même largeur, mais l'élément (D) est plus long.

ATTENTION!!!: si les tubes (D) et (C) sont interversés, la chaise sera déséquilibrée et risque de faire basculer la personne à bord.

#2.

Insérer les roues (F) sur leur axe. Insérer profondément chaque clip de roue (G) dans son propre trou aligné avec celui de l'axe de roue. (Fig.2).

S'assurer que chaque clip de roues est bien verrouillé (Fig.3).

NOTE: la circonférence des roues doit être de 138 à 140 cm (voir aussi le chapitre. 4.1 "COMMENT GONFLER LES ROUES").

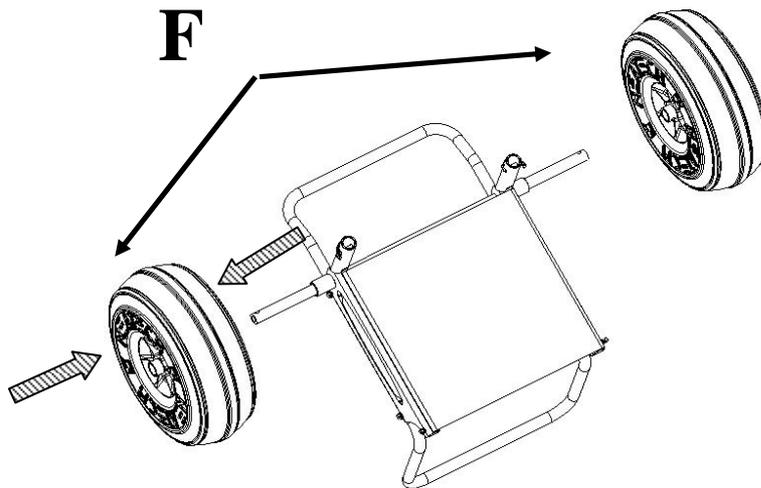


Fig.2

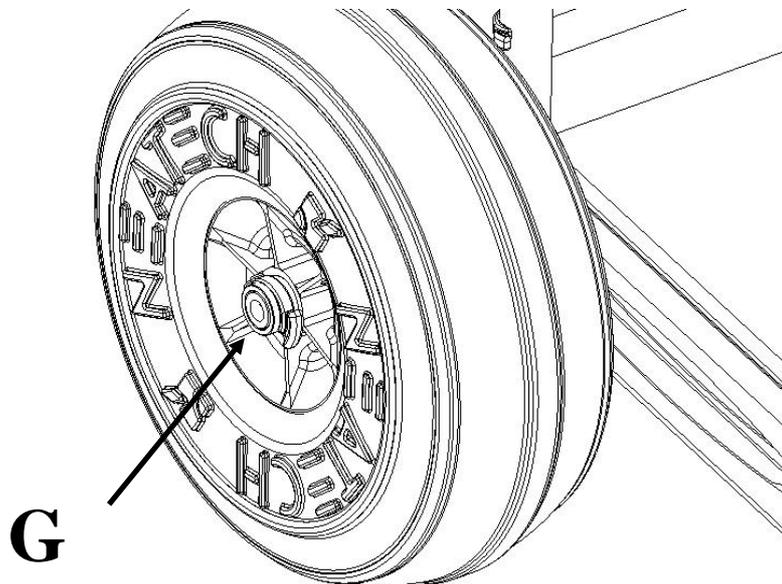


Fig.3

#3.

Insérer le dossier(A) dans le châssis principal (E), puis les 2 clips (G) profondément dans leurs trous pour verrouiller l'assemblage(Fig.4).

S'assurer que les clips (G) sont correctement verrouillés (Fig.5).

#4.

Fixer la bande velcro (H) située au bas du dossier en passant autour de l'axe des roués, comme indiqué figure 5.

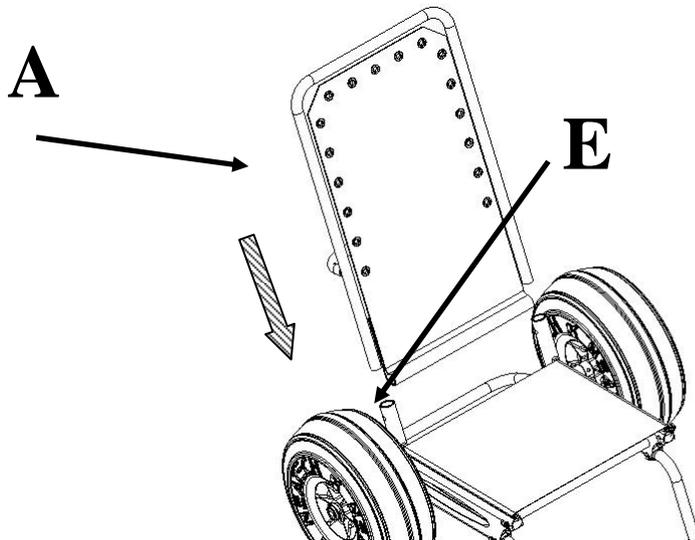


Fig.4

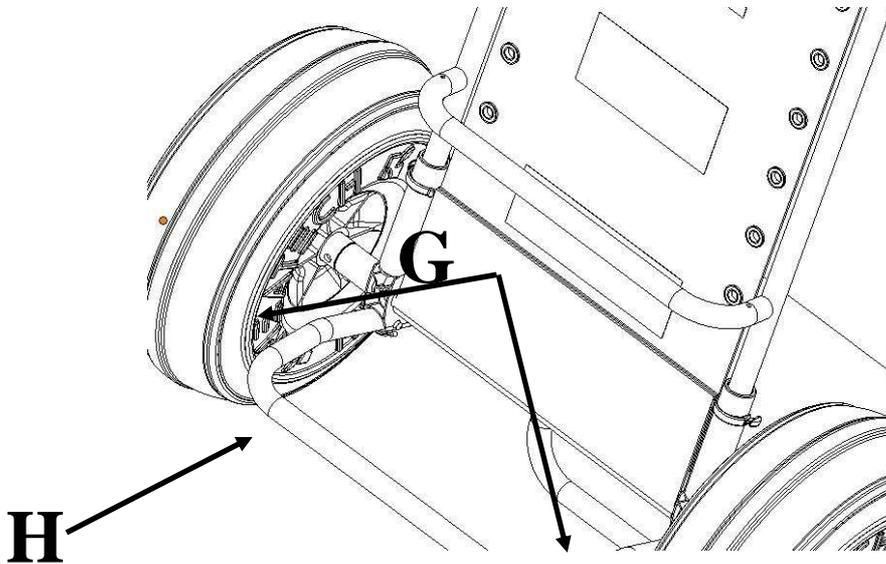


Fig.5

ATTENTION:

Il est indispensable de réaliser soigneusement les étapes #3 & #4 pour éviter un déboîtement accidentel du dossier (A).

#5.

Insérer le repose pieds (B), en retirant et remettant les 2 clips (G) pour faciliter l'opération (Fig.6).

S'assurer que les tubes sont correctement verrouillés.

Ajuster la longueur des tubes en fonction des besoins.

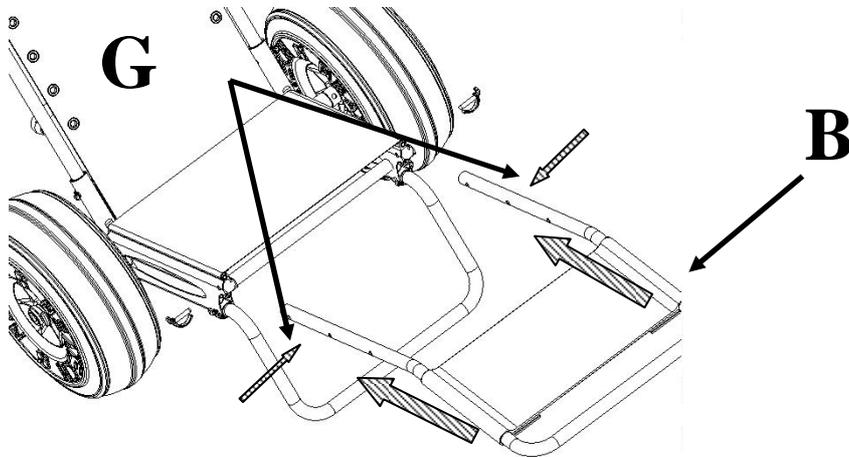


Fig.6

NOTE: pour démonter la chaise, effectuer à l'envers les étapes #5 à #1, s'assurant que les clips restent bien sur leurs tubes respectifs afin de ne pas les égarer.

2.1 OPTIONS

Accoudoirs

Assembler l'accoudoir BR au dossier A comme indiqué; pour s'assurer d'un bon assemblage utiliser les vis fournies avec les accoudoirs. (Fig.7).

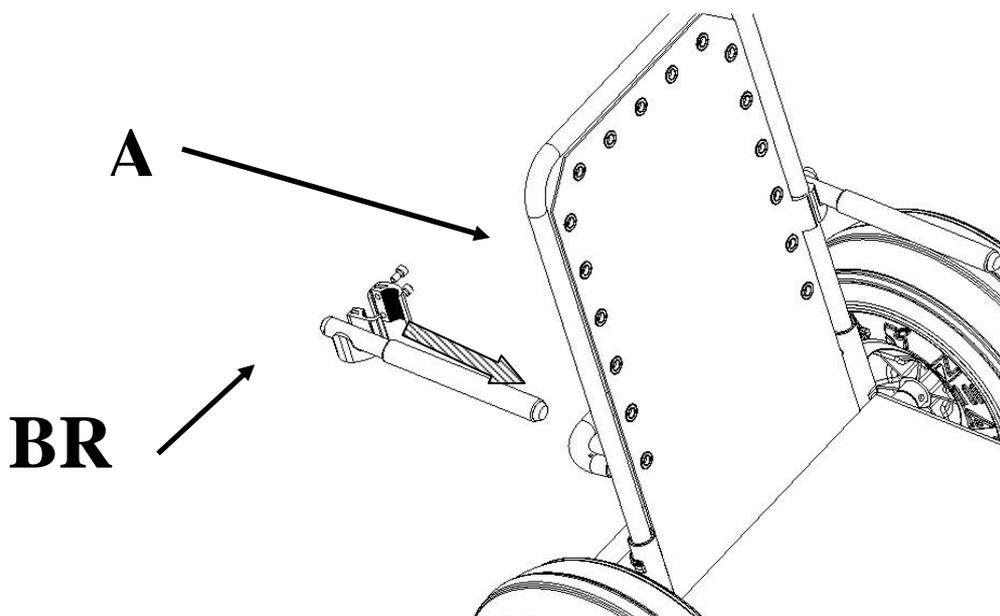


Fig.7

KIT 3° ROUE

Connecter dans les tubes à l'avant de la chaise, utilisés habituellement pour le repose pieds. Mettre en place les clips fournis dans les trous appropriés pour assurer la bonne connexion du kit.

Attention: avant l'utilisation du kit, vérifier la pression du pneu comme suit. Mesurer la circonférence de la roue et s'assurer qu'elle est entre 95 and 105 cm. Si elle est inférieure à 95 cm, vous la gonflerez sans dépasser un diamètre de 105 cm.

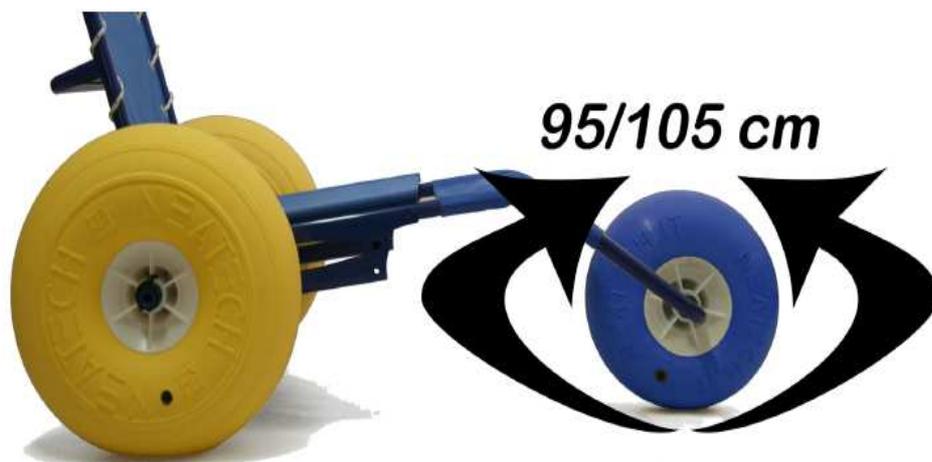


Fig.8

3. ATTENTION: RECOMMANDATION IMPORTANTE

NE PAS UTILISER LE FAUTEUIL JOB DANS DES EAUX PROFONDES OU AGITEES

NE PAS UTILISER LE FAUTEUIL JOB SANS LA SUPERVISION D'UN ADULTE

LA PRESENCE D'UN ASSISTANT EST OBLIGATOIRE LORSQUE LA CHAISE EST DANS L'EAU

LE FABRICANT N'ACCEPTERA AUCUNE RESPONSABILITE EN CAS DU NON RESPECT DES INSTRUCTIONS DE CE MANUEL.

4. Utilisation en piscine

Vous trouverez ci-après les recommandations d'utilisation du J.O.B en piscine.

Nous vous recommandons de prêter particulièrement attention à la position des mains et du dos, afin que la personne qui manipule le fauteuil le fasse dans les meilleures conditions.

Mise à l'eau en piscine:



1. Approcher le fauteuil du bord du bassin (*ne pas mettre en place la barre anti-basculement D*)



2. Descendre doucement le long du mur, tout en retenant légèrement le fauteuil



3. Basculer doucement, et à la demande, le dossier du fauteuil vers l'avant afin d'aider à la mise à l'eau

Sortie de bassin en piscine:



1. Enfoncer le fauteuil en basculant l'assise vers l'avant afin d'aider le baigneur à se mettre en place *(attention à la position des mains et du dos)*



2. Redresser l'assise après que le baigneur se soit mis en place



3. Se redresser et prendre le fauteuil à 2 mains par le haut du dossier pour faciliter la sortie. *(l'idéal est d'enfoncer le fauteuil verticalement 2 ou 3 fois pour se donner de l'élan et le sortir dans le mouvement de remontée et bénéficier ainsi de la poussée d'Archimède)*



4. Sortir le fauteuil en le tenant toujours verticalement et conduire le baigneur vers sa zone de transfert.

Idéalement, nous vous invitons à étudier la vidéo de démonstration JOB Piscine sur le site internet www.axsol.fr.

5. MAINTENANCE

Après une utilisation sur la plage, laver le fauteuil JOB à l'eau claire, en prenant soin de bien rincer les roues et les axes.

5.1 COMMENT GONFLER LES ROUES

Lors du premier montage, vérifier la circonférence des roues qui doit être d'au moins 138 cm, (voir Fig.14):

Gonfler la roue **soigneusement en vérifiant**, sa circonférence doit être comprise entre 138 cm et 140 cm.



Fig.14

ATTENTION: la valve est destinée au gonflage et non au dégonflage de la roue.

Pour dégonfler la roue, retirer le bouchon et insérer dans la valve u petit tube (ou un petit tournevis ou un stylo) pour ôter la fermeture de la valve.

5.2 COMMENT REPARER LES ROUES

En cas de crevaison des roues, suivre les étapes suivantes:

- Nettoyer la surface endommagée à l'alcool;
- Quand la surface est sèche appliquer quelques gouttes de PVC-U Tangit (colle pour tube PVC fabriqué par Henkel);
- Attendre quelques minutes pour laisser la colle sécher, puis gonfler la roue (voir ci-dessus 4.1 "Comment gonfler les roues").

6. SERVICE CLIENT

En cas de doute sur le fonctionnement du fauteuil JOB, merci de contacter en priorité votre revendeur, et à défaut l'importateur:

AXSOL
3, rue des Peupliers
78450 CHAVENAY - France
tel.+33 1 76 78 19 59 fax. +33 1 7 0 70 21 47

e-mail: infos@axsol.fr

en indiquant le numéro de série du siège sur le châssis. (E).

7. GARANTIE

Le fauteuil J.O.B. est couvert par une garantie de 2 ans à compter de sa date d'achat, appliquée par le revendeur.

La garantie couvre pièces et main d'œuvre à l'exception:

- d'une usure des pièces dans le cadre d'une utilisation anormale;
- des pièces endommagées par une surcharge ou une mauvaise utilisation;
- des pièces modifiées ou réparées sans l'autorisation du fabricant.

La garantie ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, de mauvaises conditions de stockage, de maintenance non conforme ou non autorisée.

<p>MODELE: MODEL:</p>	<p>J.O.B.</p>
<p>NUMERO DE SERIE: SERIAL NO.:</p>	
<p>DATE DE FABRICATION: MANUFACTURED ON:</p>	
<p>DATE D'ACHAT: BOUGHT ON:</p>	
<p>REVENDEUR: DEALER:</p>	

CERTIFICAT DE CONFORMITE CE

COPIE CONFORME

NEATECH.IT S.R.L. with seat in Via A. De Curtis 4/a, 80040 Cercola –NA - Italy declares, under its own responsibility, that its manufactured technical aids comply with CE 93/42 CEE directive

La société NEATECH.IT S.R.L. localisé Via A. De Curtis, 4/a - 80040 Cercola –NA – déclare, sous sa responsabilité, que ce produit d'aide technique est conforme à la directive CE 93/42 CEE.

CE CONFORMITY ASSESSMENT

FACSIMILE

GARANTIE

FABRICANT:



**Via A. De Curtis 4/a,
80040 Cercola –NA –
Italy**

Tel/Fax: +39 (0)81.555.19.46/25.22

IMPORTATEUR EXCLUSIF FRANCE:



3, rue des Peupliers

78450 CHAVENAY

Tel: +33 1 76 78 19 59

Fax: +33 1 70 70 21 47

Email: infos@axsol.fr

Internet: www.axsol.fr

NEATECH.IT S.R.L. se réserve la possibilité d'apporter les modifications au produit sans préavis.

MANUEL D'UTILISATION V.3.2 DU 3.12.2010